



Andador Rollator de Paseo


Modelo: 21535

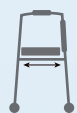


68
cm

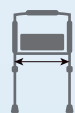

46
cm

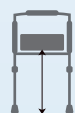

53
cm

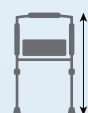

78-90
cm



7,4
kg



100
kg

Descripción

Andador Rollator de Paseo, diseñado para brindar soporte a pacientes y/o usuarios auto valentes que requieran asistencia en movilidad y/o desplazamiento.



A) Especificaciones Técnicas

- Material de asiento: vinilo flexible acolchado
- Ruedas: llanta de aleación con rayos neumático de goma sin cámara
- Frenos: llanta ABS de alta resistencia con rueda de goma sin cámara
- Material de manillas de empuje: plástico de alta densidad ergonómico
- Pernos para llave Allen
- Anodizado en color burdeo
- Barra horizontal anterior y posterior
- Incluye 4 ruedas (2 delanteras multidireccionales) con eje fijo, macizas de 8 pulgadas
- Asiento abatible, acolchado con goma de alta densidad
- Apoya espalda envuelto en goma suave
- Sistema de doble freno (bloqueo trasero)
- Ruedas delanteras multidireccionales y posteriores unidireccionales
- Empuñadura ergonómica de goma de alta densidad, anti-deslizantes altamente resistente
- Control de frenos de ruedas traseras desde empuñaduras
- Respaldo de goma de alta densidad
- Canasta metálica desmontable para llevar objetos bajo el asiento
- Resiste fuerza máxima de 100 kg de peso
- Incluye set de herramientas
- Incluye manual en español
- Incluye freno de manos y bloqueo
- Distancia entre empuñaduras desde sus caras externas (52 cm)
- Profundidad de plegado (barra horizontal anterior a la posterior) 18 cm
- Incluye canasto, apoya espalda desmontable
- Marco de estructura de aluminio
- Peso bruto 9 kg. (caja + producto)

Código	Descripción	Empaque	Unidad de Venta Min
21535	Andador Rollator de Paseo	1 unidad / caja	1 unidad

Ancho de Asiento	Ancho de andador plegado	Tamaño de rueda
46cm	17 - 20 cm	8"



B) Instrucciones de Uso

- 1) Desplegar el andador de paseo
- 2) Sitúe los puños a la altura correcta
- 3) Coloque y ajuste los accesorios
- 4) Comprobar el correcto funcionamiento de los frenos, antes de usar el andador. Empuje la palanca del freno hacia abajo para activar el freno en parada. Oirá un ligero clic cuando el freno en para esté activado
- 5) Antes de entarse, asegúrese de que el freno en parada esté activado
- 6) Coloque el pie en la barra para subir las ruedas delanteras del andador cuando necesite sortear bordes, umbrales u otros obstáculos
- 7) El andador 4 ruedas, está equipado con un deflector lateral que evita que la rueda trasera se atasque con obstáculos protuberantes como marcos de puertas y esquinas
- 8) El andador se bloquea automáticamente en la posición del plegado total. Tire de la correa para plegar el andador
- 9) Para desplegar tire de los puños de manejo hacia afuera. Luego, presione hacia abajo las barras laterales hasta que oiga un pequeño clic que indica la posición de despliegue total
- 10) Antes de usar el andador, asegúrese de que el mecanismo de plegado se encuentre fijo en su posición
- 11) Para levantar y transportar, sugerimos que pliegue el andador antes, pues es la forma mejor y más sencilla de hacerlo por la relación entre el peso y los mangos de elevación

C) Mantenimiento y Cuidados

- Limpieza en los rodamientos de las ruedas
- Lubricación en los frenos
- Limpieza constante del producto

BIOMED es distribuidor autorizado en Chile de Global Healthcare®



D) Garantía

Nuestro AndadoRollator cuenta con una garantía de 5 años y cubre todas las fallas y defectos que se demuestre que son atribuibles a una fabricación defectuosa.

La garantía no cubre el desgaste por el uso normal, las consecuencias de un manejo inadecuado o daños, mantenimiento deficiente y puesta en marcha o montaje incorrecto por parte del comprador o de un tercero o fallas atribuibles a circunstancias ajenas a nuestro control. Las piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía. La garantía se anulará si se realizan modificaciones en el producto que no estén autorizadas y no las efectúe el distribuidor especialista o se utilicen accesorios o recambios inadecuados. La garantía no cubre los costos derivados de la subsanación de defectos, como los gastos de transporte y desplazamiento, costos laborales, etc.

E) Vida Útil

La vida útil prevista es de 5 años, siempre y cuando el producto se utilice diariamente y conforme a las instrucciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento, y se respete el uso previsto, tal y como se indica en el presente documento.

F) Origen

Producto fabricado en China

G) Marca

Mass® by Global Healthcare®

BIOMED es distribuidor autorizado en Chile de Global Healthcare®